

TEST QUANTIFERON

Date : _____
Heure de prélèvement : _____
UF : _____

Etiquette PATIENT

Prélèvement :

1- Ne faites pas de carte de demande

2- Mettre les étiquettes sur les tubes

3 -Prélever les trois tubes du test sans oublier de purger la tubulure avant de prélever le premier tube. La marque noire sur l'étiquette indique le volume nécessaire au test.

4- Agiter très fortement les tubes pendant 5 secondes de façon que toutes les surfaces des tubes soient recouvertes par le sang. La formation de mousse ne nuit pas au test.

5- Laissez les tubes à T° ambiante jusqu'à l'acheminement au laboratoire.

Ne mettez surtout pas les tubes prélevés dans un réfrigérateur

Renseignements :

Nom du médecin prescripteur :

Motif de la demande :

Ce test ne peut être réalisé que chez les patients > 15 ans

Enquête autour d'un cas : OUI NON

Traitement anti TNF α : OUI NON

Tuberculose extra pulmonaire : OUI NON

Embauche Médecine préventive : OUI NON

Autre à préciser :

Espace laboratoire :

Heure d'arrivée :

N° de lot des tubes :

Etiquette Lot des tubes

Scanner cette feuille de demande en saisissant l'analyse dans Glims.