

Table de préconisation de l'ordre de prélèvement des tubes

LAB/PRE/PR01/INS14

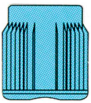
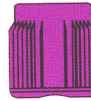
Version 2

Mise en application le : 19/12/2018

Rédigé par : L. FERRER
Date : 19/12/2018

Validé par : E. SAPP
Date : 19/12/2018

Approuvé par : C. BRUNEAU
Date : 19/12/2018

BOUCHON	FLACONS et TUBES	Homogénéisation immédiate du tube rempli
Flacon d'hémoculture aérobie puis anaérobie		8 à 10 retournements lents
	Tube de purge A prélever SEULEMENT en cas de bilan d'hémostase Ne pas remplir entièrement (1 ml) Tube à envoyer au laboratoire avec le tube d'hémostase	
	Tube coagulation « Hémostase » avec citrate ou CTAD	8 à 10 retournements lents
	Tube sans activateur de coagulation	8 à 10 retournements lents
	Tube avec gel séparateur de sérum et activateur de coagulation : ne pas prélever avant le tube de coagulation	8 à 10 retournements lents
	Tube Héparine – Lithium Contient de l'héparine Ne pas prélever avant le tube de coagulation	8 à 10 retournements lents
	Tube avec EDTA Contient du Potassium : ne pas prélever avant le tube héparine - lithium	8 à 10 retournements lents
	Tube fluorure et oxalate de potassium (Glycémie)	8 à 10 retournements lents
	Tube citrate de sodium (Vitesse de sédimentation)	8 à 10 retournements lents
	Tube PPT	8 à 10 retournements lents

Recommandations : pour l'antiseptique local, surtout ne pas utiliser d'alcool pour les dosages d'alcoolémie.